

# Hygieneempfehlung OdoCare



1. Führen Sie den OdoCare mit sich zum Patienten / Bewohnerbett und betätigen Sie die Feststellbremse



2. Öffnen Sie den OdoCare durch Drehbewegung der Trommel



3. Ziehen Sie Handschuhe an und führen die geplante Pflege durch



4. Werfen Sie den Abfall zusammen mit den Handschuhen in den Odocare. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung von Hygienebeutel.



5. Drehen Sie das Kopfteil um 180°, sodass der Abfall in den Beutel fällt.

# Reinigung



1. Drücken Sie den kleinen schwarzen Knopf und ziehen Sie gleichzeitig den oberen Hebel an



2. Halten Sie den Hebel der Trommel fest und ziehen Sie den Deckel nach oben über die Trommel weg.



3. Entfernen Sie die Trommel und reinigen Sie diese.



4. Reinigen Sie auch die Innenseite der Trommelfassung

**ACHTUNG:** Um den weißen Silikonring zu reinigen verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH Wert zwischen 4 und 8. Verwenden Sie **KEINE** starken Chemikalien oder Chlorreiniger.

