

Montageanleitung TH- 10

Wichtig!

Bitte beachten Sie, dass die Montage dieses Gerätes nur von instruiertem Fachpersonal ausgeführt werden darf.

Vor Beginn der Montage:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sich an die folgenden Schritte.

1. Vorbereitung für die Montage

Die bestehende WC- Sitzgarnitur komplett entfernen und die Schüssel - Oberfläche reinigen, so dass keine Rückstände mehr sichtbar sind.

2. Montage der TH- 10 Stütze

- 1- Entfernen Sie bei der Stütze an beiden Befestigungsschrauben (Niederspannset) die Mutter, Kunststoffschlüssel und beide Unterlegescheiben (je 1x Edelstahl und 1x Kunststoff).
- 2- Die beiden Schutzrohre (blau) bleiben auf den Schrauben, bündig an der Unterkante des Niederspannelementes.
- 3- **Kontrollieren Sie die vier, auf der Unterseite befestigten Gummipuffer (350.140.420), auf Festsitzen und mögliche Verunreinigungen.**
- 4- Setzen Sie nun das Gerät vorsichtig auf die Toilette, beachten Sie, dass die unten vorstehenden Schrauben (Niederspannschrauben) in die beiden Löcher der WC- Schüssel passen. (Bild 1)
- 5- Nach dem Aufsetzen – richten Sie das Gerät seitlich aus, sodass es eingemittelt zur WC- Schüssel liegt.
- 6- **Die Reihenfolge der Unterlegescheiben ist wichtig:** Schieben Sie zuerst die Kunststoff Scheibe und dann die Edelstahl Scheibe auf die Niederspannschrauben bevor Sie die Mutter mit dem dafür mitgelieferten Sechskantschlüssel anziehen. Ziehen Sie dann die beiden Muttern, abwechslungsweise und gleichmässig fest. Machen Sie das solange bis sich das Gerät, von Hand nicht mehr verschieben lässt.

3. Montage der Sitzgarnitur

Die Sitzgarnitur ist eine Sonderanfertigung und kann mittels eines Schnellverschlusses ohne Werkzeuge montiert bzw. demontiert werden. Führen Sie dazu den linken Knopf der Scharnierstange in das Loch der linken Sitzlasche. Drücken Sie danach den gegenüberliegenden rechten Knopf der Scharnierstange und führen Sie diesen in das Loch der rechten Sitzlasche ein. (Bild 2)

4. Montage der Spritzblende (Bild 3)

Nehmen Sie die Blende zur Hand und schieben Sie diese in die dafür vorgesehenen Nuten der beiden runden Scheiben. Nun drücken Sie den hinteren Teil der Blende so weit nach vorne bis der Lappen unter den Bügel geschoben werden kann. In umgekehrter Reihenfolge kann diese Spritzblende wiederum entfernt werden.

5. Bedienung

Für die Höhenverstellung ziehen Sie das Segment an den dafür vorgesehenen Griffschalen nach oben bis die WC- Sitzgarnitur an gewünschter Position automatisch einrastet.

Für das verstellen gegen unten, ziehen Sie das obere Segment etwas (ca. 1cm) nach oben, drücken Sie dann zusätzlich mit den Daumen die beiden verchromten Knöpfe (Bild 4) ganz ein und lassen Sie anschliessend das obere Segment nach unten gleiten. Die Knöpfe können beim Erreichen der gewünschten Position losgelassen werden.

6. Pflege und Unterhalt der Stütze

Reinigen Sie das Gerät in regelmässigen Abständen komplett. Entfernen Sie dazu das Gerät von der WC- Schüssel und reinigen Sie es mit einer milden Seifenlösung. **Vermeiden** Sie den Kontakt des Gerätes mit Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen des Pulverlackes bzw. Flugrost der Elektropolierten Teilen führen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nachgespült wird.

7. Technische Daten

Maximal zulässige Belastung der WC- Sitzgarnitur beträgt 120 kg.

Grundmaterial: Aluminium und Chromnickelstahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet / Elektropoliert.

Gewicht: 10.3 kg.