



WWW.WHEELBLADES.COM



EINFACH DURCH DEN WINTER GLEITEN

Mobilität mit dem Rollstuhl auch im Winter bei Schnee und Eis? Die Wheelblades S machen das jetzt möglich. Dank der breiten Auflagefläche wird das Gewicht optimal auf den Untergrund verteilt und ein Einsinken der beiden Vorderräder in den Schnee wird verhindert. Da die Bindung der Wheelblades S in ihrer Breite von 2 cm bis 6,5 cm verstellt werden kann, eignet sich dieses praktische Hilfsmittel für jeden Rollstuhl.

UND SO GEHT'S



1. Die Wheelblades S auf den Boden legen



2. Den Rollstuhl leicht ankippen



3. Die Vorderräder in den Bindungsschacht stellen



4. Den Klemmverschluss schliessen

BESTELLEN SIE JETZT

Sie sind von den Wheelblades S überzeugt? Dann bestellen Sie jetzt bequem übers Internet auf www.wheelblades.com oder unter Tel. +41 (0)78 898 74 11.

